

PRESSCARE G280

PRESOTERAPIA | 2 SALIDAS - 3 PROGRAMAS DE INFLADO SMART AREA

DISPOSITIVO DE PRESOTERAPIA COMPACTO, DISEÑADO PARA FAVORECER LA RECUPERACIÓN Y REDUCIR LA SENSACIÓN DE PESADEZ EN LAS PIERNAS. LA COMPRESIÓN SECUENCIAL GENERA UNA ACCIÓN RÍTMICA Y ENVOLVENTE QUE CONTRIBUYE AL DRENAJE DE LÍQUIDOS. PRÁCTICO Y FÁCIL DE USAR, SE ADAPTA AL USO DIARIO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO Y DEPORTIVO, APORTANDO BIENESTAR Y LIGEREZA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Salidas

2

Programas

- 3 modos de inflado
- 14 combinaciones de inflado «Smart Area»

Presión

40-180 mmHg (incrementos de 10)

Timer

Ajustable de 10 a 30 minutos (incrementos de 5)

Alimentación

- Red
- Batería de litio

Dimensiones (LxAxA)


172x133x71 mm

Peso

745 gr

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- 1 Dispositivo PRESSCARE G280 - batería incluida
- 2 Perneras, talla S/M/L
- 1 Fuente de alimentación
- 1 Manual operativo

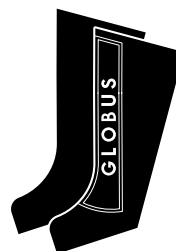

VARIANTES DEL PRODUCTO

- G7997 PRESSCARE G280 - S
- G7998 PRESSCARE G280 - M
- G7999 PRESSCARE G280 - L



PUNTOS FUERTES



Portable



Compact



5 Chambers



3 Preset programs



Area
Smart area compression



15 Intensity levels



Pressure range
40-180 mmHg



Personalized timing



Mains power &
Rechargeable battery



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PRESSCARE G280

PRESOTERAPIA

2 SALIDAS - 3 PROGRAMAS DE INFLADO
SMART AREA

Rev. Es_05_2026

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS

MODE A - ACTIVACIÓN SUAVE (Warm Up)

Inflado progresivo de una cámara cada vez para un masaje suave que favorece la relajación de las piernas.

Ideal para: comodidad diaria, recuperar la sensación de ligereza entre sesiones de entrenamiento muy seguidas, masaje reactivador antes de una competición.

SECUENCIA DE INFLADO



MODE B - MASAJE PROFUNDO

Inflado secuencial de todas las cámaras y posterior desinflado simultáneo. La compresión resulta más intensa y envolvente, pensada para una acción más profunda y un efecto remodelador.

Ideal para: masaje más intenso y profundo.



MODE A-B - SECUENCIA COMBINADA

Programa combinado que alterna la secuencia del MODO A y del MODO B, para una experiencia completa que alterna la activación suave y la compresión profunda.

Ideal para: bienestar general y momentos de relajación.



Smart Area

La función Smart Area permite inflar de forma selectiva una o varias cámaras simultáneamente para una personalización total del tratamiento. Hay 14 combinaciones diferentes de selección de cámaras.

TAMAÑO DE LOS ACCESORIOS

PERNERAS: Accesorios de 5 cámaras, ambidextras, con conectores integrados, disponibles en tres tallas S/M/L.

A - Longitud **INGUINAL-TALÓN**

B - Circunferencia **MUSLO**

C - Circunferencia **TOBILLO**

TALLA	A (cm)	B (cm)	C (cm)
PERNERAS "S"	75	76	47
PERNERAS "M"	86	80	48
PERNERAS "L"	97	84	49



EXTENSIÓN DE PERNERAS: Las extensiones de perneras están disponibles en 3 tallas (S/M/L). Para aumentar el ajuste en 7 cm en el tobillo y 9 cm en el muslo.

BANDA ABDOMINAL: Accesorio de 5 cámaras para tratamientos en abdomen, caderas y glúteos.

EXTENSIÓN PARA BANDA ABDOMINAL: Gracias al velcro, se puede fijar a la banda abdominal para mejorar su ajuste. Dimensiones: 40 x 35 cm.

TALLA ÚNICA	A (cm)	B (cm)
	125	35

