

GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

PressCare G280

Compression therapy. Wherever you are.



Manual de usuario



CE

Este manual es propiedad de Domino Srl

Queda prohibida la reproducción, divulgación y traducción a cualquier idioma, así como la transferencia y copia, de cualquier forma, incluso parcial, incluidos los soportes magnéticos o mecanografiados, a terceros sin el consentimiento de Domino Srl.

Conservación del manual de instrucciones

Conserve el manual de instrucciones en un lugar adecuado para su conservación y, en cualquier caso, en el lugar donde se utilice el producto. El documento debe conservarse durante toda la vida útil del producto, a fin de que sirva de referencia adecuada para cualquier necesidad que pueda surgir.

Los dispositivos de la línea **PressCare G280** son fabricados por:

Xiamen Healthpal Electronic Co., Ltd

Dirección: N.º 148 Binglangxili, distrito de Siming, Xiamen,
Fujian, China

Tel.: 0086-592-5326750

Fax: 0086-592-5360446

Correo electrónico: sales@xmhealthcare.com

Web: www.xmhealthcare.com

Y distribuidos por:

Domino S.r.l.

via Vittorio Veneto, 52 31013 Codognè (TV), ITALIA

Tel.: (+39) 0438.7933

Fax: (+39) 0438.793363

Correo electrónico: info@globuscorporation.com

Web: <https://www.globuscorporation.com/it/>

Solicitudes de información y asistencia técnica

Para solicitar la intervención de personal autorizado, para cualquier solicitud de información adicional sobre el producto o sobre cualquier aspecto no incluido en este manual, póngase en contacto con Domino Srl a través de los siguientes datos:



+3904387933



+39348 900 4988



info@globusitalia.com

<https://globuscorporation.com/it/>

Índice general

1. Características técnicas	6
1.1. Descripción del producto	6
1.2. Variantes del producto	7
1.3. Condiciones de uso	7
1.4. Condiciones de almacenamiento y transporte.....	7
2. Condiciones de garantía	8
3. Uso previsto	8
4. Clasificación del dispositivo	9
5. Advertencias y contraindicaciones	9
5.1. Comportamiento obligatorio.....	9
5.2. Advertencias previas al uso.....	10
5.3. Advertencias durante el uso	10
5.4. Contraindicaciones	10
5.5. Efectos adversos.....	11
6. Principios de acción.....	11
7. Equipamiento y accesorios	12
7.1. Equipamiento estándar	12
7.2. Accesorios.....	12
8. Preparación y puesta en marcha del dispositivo	13
9. Programas preestablecidos	14
9.1. Frecuencia de los tratamientos.....	14
10. Modo de empleo	15
11. Limpieza y mantenimiento	16
11.1. Limpieza	16
11.2. Modalidad de conservación.....	16
11.3. Eliminación	16
12. Etiquetado y símbolos	17
12.1. Descripción de los símbolos.....	17
12.2. Etiquetado del dispositivo	18
12.3. Etiquetado de los accesorios.....	18
13. Solución de problemas	19


1. Características técnicas

Nombre del modelo	PressCare G280
Product name	LEG MASSAGER
Color	Negro
Dimensiones (L*A*H) mm	(172,5 × 133,5 × 71)
Peso del dispositivo (g)	745
Pantalla	LCD
Material del dispositivo	PC-ABS
Presión (mmHg)	de 40 a 180 (en incrementos de 10)
Duración del tratamiento (min)	Modificable de 10 a 30 (incrementos de 5)
Modalidad de inflado	3
Función «Smart Area»	14 combinaciones
Potencia máxima (mmHg)	180
Características de la fuente de alimentación	Manufacturer: Xiamen Invcy Electronics Co., Ltd. Model: IVP0950-2000G Input: 100-240VAC 50/60Hz 0.5A Output: 9.5V === 2.0A 19.0W
Características de la batería	Batería de iones de litio 7,4 V CC, 3500 mAh, 25,9 Wh

1.1. Descripción del producto

PressCare G280	
	1. Dispositivo PressCare G280 2. Conector 3. Tubos flexibles 4. Cremalleras de las botas 5. Compartimentos de las botas

Dispositivo PressCare G280 – Interfaz y controles

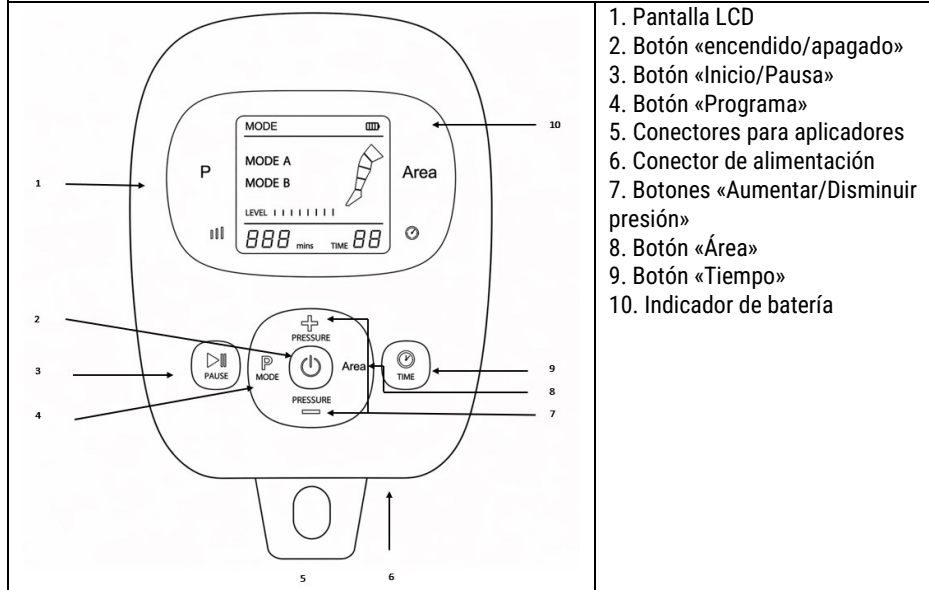

1.2. Variantes del producto

REF	Descripción de la variante
G7997	PressCare G280 S
G7998	PressCare G280 M
G7999	PressCare G280 L

1.3. Condiciones de uso

Temperatura	de -10 °C a +45 °C
Humedad relativa	máx. 90 %
Presión	de 86 kPa a 105 kPa

1.4. Condiciones de almacenamiento y transporte

Temperatura	de -10 °C a +60 °C
Humedad relativa	máx. 90 %
Presión	de 86 kPa a 105 kPa

2. Condiciones de garantía

El aparato está garantizado al primer usuario durante un periodo de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra contra defectos de materiales o de fabricación, y de doce (12) meses en caso de que el usuario lo utilice con fines profesionales, siempre que se utilice de forma adecuada y se mantenga en condiciones normales de funcionamiento.

La validez de la garantía se limita en los siguientes casos:

- seis (6) meses para los accesorios incluidos sujetos a desgaste, como, por ejemplo, fuentes de alimentación, cables, botas, mangas, fajas abdominales, conectores y baterías.

La presente garantía es válida y efectiva en el país donde se haya adquirido el producto. En caso de que el producto se haya adquirido en cualquier país de la Comunidad Europea, la garantía será válida en todos los países de la misma. Para poder beneficiarse del servicio de garantía, el usuario deberá cumplir las siguientes cláusulas de garantía:

1. Los productos deberán enviarse para su reparación, a cargo y por cuenta del cliente, en su embalaje original y con el equipamiento original completo.
2. La garantía del producto estará subordinada a la presentación de un documento fiscal (recibo fiscal o factura de venta) que acredite la fecha de compra del producto.
3. La reparación no afectará a la fecha de vencimiento original de la garantía y no supondrá su renovación ni ampliación.
4. En caso de que, durante la intervención de reparación, no se detecte ningún defecto en el producto, se cobrarán de todos modos los gastos relativos a la verificación técnica.
5. La garantía quedará anulada si la avería se debe a: golpes, caídas, uso incorrecto o inadecuado del producto, uso de una fuente de alimentación/cargador externo no original, eventos accidentales, alteración del producto, sustitución/desprendimiento de los precintos de garantía y/o manipulación inapropiada del producto. Asimismo, la garantía no cubre los daños causados durante el transporte por el uso de embalajes inadecuados (véase el punto 1).
6. La garantía no cubre la imposibilidad de utilizar el producto, otros costes incidentales o consecuentes ni otros gastos en que incurra el comprador.

Nota: Antes de enviar la máquina para su reparación, se recomienda leer atentamente las instrucciones de uso que figuran en el manual y consultar la página web de Globus.

En caso de que sea necesario enviar el producto al servicio técnico, diríjase a su distribuidor o al servicio técnico de Globus.

3. Uso previsto

Los dispositivos de la línea PressCare G280 están destinados a ser utilizados en el ámbito de la estética, el deporte y el bienestar personal. Para un uso correcto del dispositivo, lea el manual. A continuación se enumeran los usos recomendados para los ámbitos previstos.

DEPORTE

- Reduce la fatiga
- Relaja la musculatura

- Favorece la recuperación tras el entrenamiento o entre sesiones muy seguidas
- Optimiza el calentamiento para mejorar el rendimiento

BIENESTAR

- Estimula la microcirculación
- Reduce la sensación de piernas pesadas
- Aporta una sensación de bienestar
- Reduce el dolor muscular

ESTÉTICA

- Estimula el drenaje
- Reduce la sensación de hinchazón
- Combate la retención de líquidos
- Mejora la silueta

4. Clasificación del dispositivo

Los dispositivos cumplen con:

- REGLAMENTO (UE) 2023/988 sobre la seguridad general de los productos
- Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2014/30/UE)
- Directiva sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas (RoHS 2011/65/UE), incluida la modificación (UE) 2015/863.

5. Advertencias y contraindicaciones

5.1. Comportamiento obligatorio



Lea atentamente todo el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo y sus componentes o accesorios. Guarde el manual en un lugar adecuado para su conservación y, en cualquier caso, en el lugar donde se utilice el dispositivo.

Para mantener el máximo nivel de seguridad, el usuario debe utilizar el aparato respetando las prescripciones y los límites de uso indicados en el manual de instrucciones.

Queda prohibida la reproducción, incluso parcial, en cualquier forma y por cualquier medio electrónico o mecánico, de los textos y/o fotografías contenidos en este manual sin el permiso por escrito del fabricante.

Debe utilizarse con los accesorios suministrados por Domino s.r.l.

Debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

5.2. Advertencias previas al uso

Al recibir el dispositivo, compruebe la integridad de su embalaje y que el nivel de limpieza del dispositivo no se haya visto alterado.

En caso de que sea necesario utilizar el dispositivo cerca o sobre otros aparatos, compruebe su correcto funcionamiento.

Si la carcasa, el cable o el conector de la fuente de alimentación presentan signos de desgaste o daños, sustitúyalos inmediatamente.

Asegúrese de que el usuario no padezca ninguna de las patologías indicadas en la sección «Contraindicaciones».

Antes de cada uso, compruebe siempre el buen estado del aparato y de los accesorios (condición indispensable para realizar el tratamiento).

Se declina toda responsabilidad en caso de un uso diferente al indicado y prescrito en el presente manual.

5.3. Advertencias durante el uso

Durante el uso del dispositivo deben seguirse algunas advertencias.

- Los cables y conectores no deben enrollarse alrededor del cuello de las personas para evitar cualquier riesgo de estrangulamiento o asfixia.
- No cubrir el dispositivo con ningún elemento.
- Mantenga los tubos de conexión de manera que no queden obstruidos, permitiendo así el correcto flujo de aire en las cámaras.
- El dispositivo y sus componentes no están protegidos contra la entrada de líquidos: no vierta ningún líquido sobre el dispositivo ni sus componentes.
- Los aparatos de radiocomunicación móviles y fijos podrían afectar al funcionamiento del dispositivo.
- El dispositivo no debe utilizarse en presencia de líquidos inflamables.
- Mantenga el dispositivo en un lugar seco.

5.4. Contraindicaciones

Contraindicaciones absolutas

El uso de la presoterapia está contraindicado en los siguientes casos:

1. Trombosis venosa profunda (TVP)
2. Tromboflebitis aguda
3. Embolia pulmonar reciente
4. Infecciones locales agudas (celulitis infecciosa, erisipela, infecciones cutáneas bacterianas)
5. Insuficiencia cardíaca congestiva grave
6. Edema pulmonar
7. Isquemia arterial grave (arteriopatía periférica avanzada, p. ej., ABI < 0,5)

8. Neoplasia maligna activa en la zona tratada (especialmente en el ámbito linfológico si no está controlada por un médico).

Contraindicaciones relativas

La presoterapia solo debe utilizarse con precaución o bajo supervisión médica en los siguientes casos:

1. Hipertensión arterial no controlada
2. Fragilidad capilar marcada
3. Edema de origen cardíaco
4. Trastornos de la sensibilidad (neuropatía diabética, percepción reducida del dolor)
5. Embarazo
6. Varices muy dolorosas
7. Heridas abiertas o dermatitis
8. Linfedema no diagnosticado.

5.5. Efectos adversos

No se han registrado efectos adversos. En casos particulares, si no se asocia a terapias complementarias, pueden surgir casos de endurecimiento del edema y de inflamación crónica.

6. Principios de acción

La presoterapia no es un simple tratamiento mecánico, sino una precisa metodología de **compresión neumática secuencial** diseñada para reactivar la vitalidad de los tejidos. Mediante una onda de presión rítmica y envolvente, el dispositivo realiza un masaje drenante de los líquidos de las extremidades, ejerciendo efectos beneficiosos tanto sobre la circulación venosa como sobre la linfática, devolviendo una ligereza inmediata a todo el cuerpo.

La presoterapia para el deporte

En el ámbito deportivo, la presoterapia resulta ser un aliado indispensable para la **recuperación post-esfuerzo**. Tras un entrenamiento o una competición, las extremidades inferiores suelen aparecer más hinchadas y la sensación de pesadez es más evidente: una sesión específica acelera los procesos de **recuperación muscular**, devolviendo elasticidad y agilidad a los músculos en un tiempo reducido.

Protocolo de uso

Para garantizar la máxima eficacia y el respeto a la fisiología del cuerpo, el ciclo de trabajo sigue rigurosamente el movimiento natural de los fluidos en **sentido distal-proximal** (desde las extremidades hacia el corazón).

Secuencia de uso

Una vez colocadas las **botas**, la presión comenzará a actuar partiendo de la planta del pie, ascendiendo de forma fluida y constante hacia la zona inguinal. Durante el uso de **la faja**

abdominal: el inflado comenzará por la cámara superior, para luego descender progresivamente hacia las más cercanas a la ingle.

7. Equipamiento y accesorios

Los productos de la línea PressCare se suministran con botas y conectores incluidos; por lo tanto, una vez abierto el embalaje, compruebe que el equipamiento estándar esté completo. En caso de que falte algún elemento, póngase en contacto con el distribuidor autorizado al que haya acudido para realizar la compra.

7.1. Equipamiento estándar

- 1 Dispositivo PressCare G280 con batería incluida
- 2 Botas con conectores integrados (tallas S/M/L)
- 1 Fuente de alimentación PressCare G250/G280
- 1 Manual de uso del PressCare G280



7.2. Accesorios

Botas de 5 cámaras, compatibles con PressCare G250/G280, ambidiestras, disponibles en tres tallas (S/M/L). Material: nylon con conectores de PVC.		
A - Longitud INGUINAL-TALÓN B - Circunferencia del MUSLO C - Circunferencia del TOBILLO		
REF	Nombre del artículo	Descripción del artículo
G7962	Bota G250/G280 - S	Longitud INGUINAL-TALÓN: 75 cm Circunferencia del MUSLO: 76 cm Circunferencia del TOBILLO: 47 cm
G7963	Bota G250/G280 - M	Longitud INGUINAL-TALÓN: 86 cm

		Circunferencia del MUSLO: 80 cm Circunferencia del TOBILLO: 48 cm
G7964	Bota G250/G280 - L	Longitud INGUINAL-TALÓN: 97 cm Circunferencia del MUSLO: 84 cm Circunferencia del TOBILLO: 49 cm
G7968	Extensión Bota G250/G280 - S	Aumenta la circunferencia de la bota en unos 7 cm en el tobillo y 9 cm en el muslo.
G7969	Extensión Bota G250/G280 - M	Aumenta la circunferencia de la bota en unos 7 cm en el tobillo y 9 cm en el muslo.
G7970	Extensión Bota G250/G280 - L	Aumenta la circunferencia de la bota en unos 7 cm en el tobillo y 9 cm en el muslo.
G7971	Faja abdominal para G250/G280/G400	Accesorio de 5 cámaras para tratamientos en abdomen, caderas y glúteos. Compatible con los dispositivos PressCare G250/G280/G400. Talla única. Dimensiones: (125 x 35) cm Material: nylon con conectores de PVC.
G7972	Extensión para faja abdominal para G250/G280/G400	Gracias al velcro, se puede fijar a la banda abdominal para mejorar su ajuste. Talla única. Dimensiones: (40 x 35) cm Material: nylon.

8. Preparación y puesta en marcha del dispositivo

Saque el producto y sus eventuales componentes del embalaje. No deje los elementos del embalaje al alcance de los niños ni los deseche en medio ambiente.

Antes de iniciar el tratamiento, coloque el dispositivo sobre una superficie plana. Conecte el adaptador de corriente al dispositivo y a la red eléctrica (si no desea utilizar el dispositivo con batería).

Para un correcto funcionamiento del producto, el usuario debe ponerse las botas incluidas y conectar ambos tubos flexibles a la unidad de control.

Para ponerse las botas: abrir la cremallera, ponerse la bota y volver a cerrar la cremallera. Conectar el tubo flexible de la bota a la unidad de control, siguiendo la dirección de la flecha del conector.

En caso de que sea necesario aumentar la circunferencia de las botas,

conecte, mediante las dos cremalleras, las correspondientes extensiones, que se pueden adquirir como accesorio opcional.

Antes de iniciar el tratamiento, adopte una posición cómoda: sentada, reclinada o tumbada.



9. Programas preestablecidos

Descripción del programa	Secuencia de inflado de las cámaras
MODE A - ACTIVACIÓN SUAVE (Warm Up): Inflado progresivo de una cámara cada vez para un masaje suave que favorece la relajación de las piernas. <i>Ideal para:</i> confort cotidiano, recuperar la sensación de ligereza entre sesiones de entrenamiento muy seguidas, masaje reactivador antes de una competición. Duración recomendada por sesión: 20-30 min	
MODE B - MASAJE PROFUNDO: Inflado secuencial de todas las cámaras y posterior desinflado simultáneo. La compresión resulta más intensa y envolvente, pensada para una acción más profunda y un efecto remodelador. <i>Ideal para:</i> masaje más intenso y profundo Duración recomendada por sesión: 20-30 min	
MODE A - MODE B - SECUENCIA COMBINADA El programa combina las secuencias de inflado MODE A y MODE B, para ofrecer una experiencia completa que alterna entre una estimulación suave y una compresión profunda. <i>Ideal para:</i> bienestar general y momentos de relajación. Duración recomendada por sesión: 25-35 min	

9.1. Frecuencia de los tratamientos

Frecuencia semanal recomendada

- Uso ligero / mantenimiento: 2-3 sesiones a la semana.
- Uso regular / bienestar diario: 3-5 sesiones a la semana.
- Uso intensivo (ciclos cortos): hasta 5-6 sesiones a la semana, alternando los diferentes programas disponibles.

Sugerencias para el tratamiento

- Alterne programas de compresión más dinámica (p. ej., MODE B) con programas más graduales y relajantes (p. ej., MODE A y el combinado MODE A-B) para favorecer la comodidad y la variedad de la estimulación.
- El nivel de presión debe ser siempre agradable y bien tolerado: la compresión debe percibirse como eficaz, pero nunca dolorosa o excesivamente intensa.
- Al finalizar la sesión, se recomienda mantener una posición relajada durante unos minutos, favoreciendo una agradable sensación de bienestar y ligereza.

- Si el resultado percibido no fuera satisfactorio, es posible repetir el tratamiento en los días siguientes modificando progresivamente los parámetros de uso, aumentando gradualmente el tiempo de aplicación y/o el nivel de presión hasta encontrar la configuración más adecuada a las propias necesidades.
- En caso de molestias, dolor o sensación excesiva de compresión, reduzca el nivel de presión y considere un aumento gradual de la duración de la sesión, manteniendo siempre una sensación de comodidad durante todo el tratamiento.

10. Modo de empleo

Lea atentamente las precauciones de seguridad antes de utilizar el producto. Para obtener un masaje más eficaz, utilice el producto siguiendo las instrucciones.

Encendido y apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo.

El dispositivo cuenta con función de memoria: al encenderse, se recuperan automáticamente los últimos ajustes utilizados (nivel de presión, modo de inflado y duración del tratamiento), que se proponen como configuración predeterminada para la siguiente sesión y se muestran en la pantalla a la espera de la siguiente orden; durante esta fase, la palabra «Program» parpadeará hasta que se inicie el nuevo programa seleccionado.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado de nuevo el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

ATENCIÓN: si no se inicia ningún tratamiento, el dispositivo se apagará automáticamente transcurridos 3 minutos de inactividad.

Selección del programa: es posible cambiar el modo de inflado pulsando la tecla «Program». Hay tres modos: MODE A, MODE B, MODE A-B.

Selección de cámara: al pulsar la tecla «Area», es posible seleccionar la parte del cuerpo a tratar y, a continuación, inflar una o varias cámaras para una personalización total del tratamiento. Hay 14 combinaciones diferentes de selección de cámaras.

Ajuste de la presión: hay 15 niveles de presión, de 40 a 180 mmHg (en incrementos de 10 mmHg). Para modificar la intensidad del masaje, utilice las teclas de aumento (+) y disminución (-) de la presión. Recomendamos ajustar en la primera aplicación una presión de unos 40 mmHg para luego, si es necesario, aumentarla progresivamente.

Duración del tratamiento: al pulsar la tecla «Tiempo» se puede aumentar la duración del tratamiento en rangos de 5 minutos, desde un tiempo mínimo previsto de 10 minutos hasta un tiempo máximo de 30 minutos. Recomendamos comenzar con tratamientos breves de 10 minutos y, posteriormente, aumentar la duración en las sesiones siguientes si es necesario.

Inicio y pausa del programa: Para iniciar el inflado de las botas, tras seleccionar el programa deseado o las cámaras que se van a inflar, pulse la tecla «Start/Pausa». Para interrumpir el inflado y mantener la presión alcanzada, vuelva a pulsar el mismo botón. Cuando el programa está en pausa, parpadeará en la pantalla la palabra «Program». Si el dispositivo permanece en pausa por un plazo de 3 minutos, se apagará.

Fin del tratamiento: Después de su uso, apague el dispositivo y desconecte ambas botas del dispositivo para permitir que el aire salga de las cámaras.

11. Limpieza y mantenimiento

11.1. Limpieza

1. Antes de limpiar el dispositivo o sus accesorios: apague el dispositivo y asegúrese de que no esté conectado a la red eléctrica.
2. Si están sucios, limpie la unidad de control, las botas y los tubos flexibles con un paño húmedo y limpio.
3. Sécalos bien con un paño limpio.
4. No permita que entren cuerpos extraños en los tubos flexibles.
5. No sumerja las cámaras y los tubos de conexión en agua. No los lave en seco.
6. No utilice gasolina, alcohol, disolventes u otros líquidos corrosivos para limpiar la máquina, ya que podrían provocar fallos de funcionamiento o dañar o decolorar los componentes.
7. No permita que se acumulen pelusas o polvo en la unidad de control o en las conexiones de los tubos flexibles. Si se acumulan pelusas o polvo, limpie todo el sistema con un paño seco antes de utilizarlo.

Consulte siempre los símbolos de lavado que aparecen en la etiqueta del accesorio.

11.2. Modalidad de conservación

En caso de inactividad prolongada, conserve el producto en un lugar seco y protegido de la luz. Proteja los dispositivos del polvo guardándolos, por ejemplo, en el embalaje original o en un embalaje similar. No coloque los dispositivos cerca de fuentes de combustión o de fuentes de calor intensas. Consulte también la información contenida en el apartado [5.1. Comportamiento obligatorio](#) y en el apartado [1.4. Condiciones de almacenamiento y transporte](#).

11.3. Eliminación

El producto debe desecharse respetando la normativa vigente en su país. Se informa al usuario de que puede enviar el producto al final de su vida útil al Distribuidor.

12. Etiquetado y símbolos

12.1. Descripción de los símbolos

	El símbolo CE indica que el producto cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2023/988.	MADE IN PRC	Indica que el producto se ha fabricado en la República Popular China.
	Indica la obligación de leer el manual antes de utilizar el dispositivo.		Informa de una conducta obligatoria.
	Símbolo RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). Indica que el producto no debe desecharse como residuo no selectivo, sino que debe enviarse a instalaciones de recogida específicas para su recuperación y reciclaje. La marca RAEE (en inglés WEEE) debe figurar en todos los aparatos eléctricos y electrónicos comercializados en la UE.		Indica qué materiales deben desecharse como residuos reciclables.
			Indica que el producto se ha fabricado de conformidad con la Directiva 2011/65/CE
			Indica que la clase eléctrica del dispositivo es «clase II»
	Identifica al fabricante		Identifica la fecha de fabricación.
	Identifica al importador.	Product name	Identifica la tecnología del dispositivo
	Indica el código de artículo del producto.		Indica el número de serie del producto.
	Aparece en el embalaje exterior e indica el rango de temperatura para el transporte, el almacenamiento y la conservación del producto.	DC Input	Especifica los valores de alimentación del dispositivo.
	Aparece en el embalaje exterior e indica el rango de humedad relativa para el transporte, el almacenamiento y la conservación del producto.	Output	Especifica las prestaciones del dispositivo.

	Aparece en el embalaje exterior e indica el rango de presión para el transporte, el almacenamiento y la conservación del producto.	DC Power Supply	Indica las características de la fuente de alimentación del dispositivo, su fabricante y el modelo
---	--	------------------------	--

12.2. Etiquetado del dispositivo



12.3. Etiquetado de los accesorios

	Este símbolo en su aparato indica que cumple con los requisitos de las directivas vigentes.		No lavar
MADE IN PRC	Indica que el producto se ha fabricado en la República Popular China.		No planchar
REF	Indica el código de artículo del producto.		No escurrir

13. Solución de problemas

Fenómeno	Posible causa	Solución
El dispositivo no funciona y la pantalla está apagada.	1. El dispositivo no está conectado a la fuente de alimentación. 2. La fuente de alimentación no está conectada a la red eléctrica. 3. No hay alimentación de red.	1. Pulse el botón de encendido para encender la unidad de control. 2. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté correctamente conectada a la unidad de control y a la toma de corriente. 3. Compruebe si la toma de corriente funciona.
La pantalla del dispositivo está encendida, pero las cámaras no se inflan.	1. Solo una de las botas está conectada al tubo de aire. 2. Los tubos de aire no están bien conectados. 3. Las botas están dañadas.	1. Conecte ambas botas. 2. Compruebe que los tubos de aire estén correctamente conectados. 3. Compruebe si las mangueras tienen fugas de aire y si están en buen estado.
El inflado se interrumpe durante el funcionamiento.	1. Los tubos de aire ya no están bien conectados. 2. Hay fugas en los tubos o en las mangas. 3. El tiempo del programa preestablecido ha finalizado. 4. El dispositivo está descargado.	1. Compruebe que los tubos de aire estén bien conectados. 2. Compruebe si hay fugas de aire en los tubos o en las cámaras de las botas. 3. El dispositivo se apagará automáticamente al finalizar el tiempo preestablecido; pulse el botón de encendido para iniciar una nueva sesión, si es necesario. 4. Recargue el dispositivo utilizando el cargador incluido con el producto. Si el problema es la batería: La sustitución de la batería debe ser realizada exclusivamente por personal cualificado y autorizado por Domino Srl. Para solicitar el servicio, ponte en contacto con el Distribuidor donde compraste el producto.

GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

DOMINO S.R.L.



Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALIA



(+39) 0438 7933

globuscorporation.com