

GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

PressCare G280

Compression therapy. Wherever you are.



Manuale di utilizzo



CE

Questo manuale è di proprietà di Domino Srl

È fatto divieto di riproduzione, divulgazione e traduzione in qualsiasi lingua, trasferimento e copia, in qualsiasi maniera, anche parziale, compresi eventuali supporti magnetici o dattiloscritti, a terzi senza il consenso di Domino Srl.

Conservazione del manuale di istruzioni

Conservare il manuale di istruzioni in luogo idoneo al suo mantenimento e comunque nel luogo dove viene utilizzato il prodotto. Il documento va conservato per tutta la durata di vita del prodotto, in modo da costituire adeguato riferimento per tutte le possibili necessità.

I dispositivi della linea **PressCare G280** sono fabbricati da:

Xiamen Healthpal Electronic Co., Ltd

Add: No. 148 Binglangxili, Siming distric, Xiamen, Fujian, China

Tel: 0086-592-5326750

Fax: 0086-592-5360446

E-mail: sales@xmhealthcare.com

Web: www.xmhealthcare.com

E distribuiti da:

Domino S.r.l.

via Vittorio Veneto, 52 31013 Codognè (TV), Italy

Tel: (+39) 0438.7933

Fax: (+39) 0438.793363

E-mail: info@globuscorporation.com

Web: www.globuscorporation.com

Richieste di informazioni e assistenza tecnica

Per richiedere l'intervento di personale autorizzato, per ogni richiesta di ulteriori informazioni sul prodotto o su quanto non già riportato in questo manuale, prendere contatto con Domino Srl per mezzo dei seguenti contatti:



+3904387933

+39348 900 4988



info@globusitalia.com

www.globuscorporation.com

Indice Generale

1. Caratteristiche tecniche.....	6
1.1. Descrizione del prodotto	6
1.2. Varianti prodotto	7
1.3. Condizioni di utilizzo.....	7
1.4. Condizioni di immagazzinamento, stoccaggio e trasporto	7
2. Condizioni di garanzia	8
3. Destinazione d'uso.....	8
4. Classificazione del dispositivo	9
5. Avvertenze e controindicazioni	9
5.1. Comportamento obbligatorio.....	9
5.2. Avvertenze prima dell'uso	9
5.3. Avvertenze durante l'uso	10
5.4. Controindicazioni	10
5.5. Effetti indesiderati	11
6. Principi d'azione	11
7. Dotazione e accessori	12
7.1. Dotazione standard.....	12
7.2. Accessori.....	12
8. Preparazione e messa in servizio del dispositivo	13
9. Programmi preimpostati	14
9.1. Frequenza trattamenti.....	14
10. Modo d'uso.....	15
11. Pulizia e manutenzione.....	16
11.1. Pulizia.....	16
11.2. Modalità di conservazione.....	16
11.3. Smaltimento.....	16
12. Etichettatura e simboli.....	16
12.1. Descrizione dei simboli	16
12.2. Etichettatura del dispositivo	18
12.3. Etichettatura accessori	18
13. Risoluzione problemi	18


1. Caratteristiche tecniche

Nome modello Globus	PressCare G280
Product name	Leg massager
Colore	Nero
Dimensioni (L*W*H) mm	(172.5*133.5*71)
Peso dispositivo (g)	745
Display	LCD
Materiale dispositivo	PC-ABS
Pressione (mmHg)	da 40 a 180 (step di 10)
Durata trattamento (min)	Modificabile da 10 a 30 (step 5)
Modalità di gonfiaggio	3
Funzione "Smart Area"	14 combinazioni
Potenza max (mmHg)	180
Caratteristiche alimentatore	Manufacturer: Xiamen Invcy Electronics Co., Ltd. Model: IVP0950-2000G Input: 100-240VAC 50/60Hz 0.5A Output: 9.5V --- 2.0A 19.0W
Caratteristiche batteria	Batteria agli ioni di Litio 7.4Vdc 3500mAh 25.9Wh

1.1. Descrizione del prodotto

PressCare G280	
	1. Dispositivo PressCare G280 2. Connettore 3. Tubi flessibili 4. Cerniere dei gambali 5. Camere dei gambali

Dispositivo PressCare G280 – Interfaccia e comandi

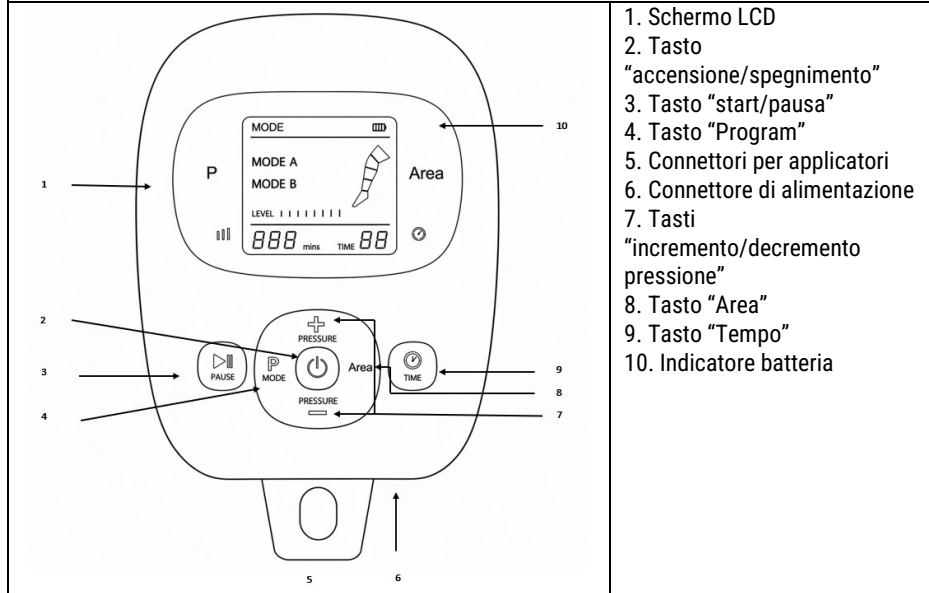

1. Schermo LCD
2. Tasto
"accensione/spegnimento"
3. Tasto "start/pausa"
4. Tasto "Program"
5. Connettori per applicatori
6. Connettore di alimentazione
7. Tasti
"incremento/decremento
pressione"
8. Tasto "Area"
9. Tasto "Tempo"
10. Indicatore batteria

1.2. Varianti prodotto

REF	Descrizione variante
G7997	PressCare G280 S
G7998	PressCare G280 M
G7999	PressCare G280 L

1.3. Condizioni di utilizzo

Temperatura	da -10 °C a +45 °C
Umidità relativa	max 90 %
Pressione	da 86 kPa a 105 kPa

1.4. Condizioni di immagazzinamento, stoccaggio e trasporto

Temperatura	da -10 °C a +60 °C
Umidità relativa	max 90 %
Pressione	da 86 kPa a 105 kPa

2. Condizioni di garanzia

L'apparecchio è garantito al primo utilizzatore per il periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiali o di fabbricazione, di dodici (12) mesi nel caso in cui l'utente utilizzi lo stesso a scopo professionale, purché utilizzato appropriatamente e mantenuto in normali condizioni di efficienza.

La validità della garanzia è limitata nei seguenti casi:

- sei (6) mesi per gli accessori in dotazione soggetti ad usura come, ad esempio, alimentatori, cavi, gambali, bracciali, fasce addominali, connettori e batterie.

La presente garanzia è valida ed efficace nel Paese dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui il prodotto sia stato acquistato in un qualsiasi Paese della Comunità Europea, la garanzia è comunque valida in tutti i suoi Paesi. Per usufruire del servizio di garanzia, l'utente deve rispettare le seguenti clausole di garanzia:

1. I prodotti dovranno essere consegnati per la riparazione a cura e spese del Cliente negli imballaggi originali e con la dotazione originale completa.

2. La garanzia del prodotto sarà subordinata all'esibizione di un documento fiscale (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura di vendita), che attesta la data di acquisto del prodotto.

3. La riparazione non avrà effetto sulla data originale di scadenza della garanzia e non porterà il rinnovo o l'estensione della stessa.

4. Nel caso in cui, all'atto dell'intervento di riparazione, non si riscontri alcun difetto del prodotto stesso, saranno comunque addebitate le spese relative alla verifica tecnica.

5. La garanzia decade ove il guasto sia stato determinato da: urti, cadute, uso errato od improprio del prodotto, utilizzo di un alimentatore/caricabatterie esterno non originale, eventi accidentali, alterazione del prodotto, sostituzione/distacco dei sigilli di garanzia e/o manomissione del prodotto. La stessa inoltre non copre danni causati durante il trasporto per utilizzo di imballi non idonei (vedi punto 1).

6. La garanzia non risponde della impossibilità di utilizzazione del prodotto, di altri costi incidentali o consequenziali o di altre spese sostenute dall'acquirente.

N.B. Prima di restituire la macchina per le riparazioni, si consiglia di leggere attentamente le istruzioni d'uso contenute nel manuale e di consultare il sito Globus.

In caso si debba inviare il prodotto in assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore o al servizio di assistenza Globus.

3. Destinazione d'uso

I dispositivi della linea PressCare G280 sono destinati ad essere utilizzati in ambito estetico, sportivo e per il benessere della persona. Per un corretto utilizzo del dispositivo leggere il manuale. Di seguito vengono elencati gli utilizzi suggeriti per gli ambiti previsti.

SPORT

- Riduce l'affaticamento
- Rilassa la muscolatura

- Favorisce il recupero post allenamento o tra sessioni ravvicinate
- Ottimizza il riscaldamento per migliorare la performance

BENESSERE

- Stimola il microcircolo
- Riduce la sensazione di gambe pesanti
- Dona una percezione di benessere
- Riduce l'indolenzimento muscolare

ESTETICA

- Stimola il drenaggio
- Riduce la sensazione di gonfiore
- Contrasta la ritenzione idrica
- Migliora la silhouette

4. Classificazione del dispositivo

I dispositivi sono conformi a:

- REGOLAMENTO (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE)
- Direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose (RoHS 2011/65/UE), compresa la modifica (UE) 2015/863.



5. Avvertenze e controindicazioni

5.1. Comportamento obbligatorio

Leggere attentamente tutto il manuale di istruzioni prima di utilizzare il dispositivo ed i suoi componenti od accessori. Conservare il manuale in un luogo idoneo alla sua conservazione e comunque nel luogo in cui il dispositivo viene utilizzato.

Per mantenere il livello massimo di sicurezza l'utente deve utilizzare l'apparecchio nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di impiego del manuale d'uso.

Senza il permesso scritto del Produttore sono vietati la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico di testi e/o foto contenute in questo manuale.

Dev'essere utilizzato con gli accessori forniti da Domino s.r.l.

Dev'essere tenuto fuori della portata dei bambini.

5.2. Avvertenze prima dell'uso

Al ricevimento del dispositivo controllare l'integrità del confezionamento in modo che il livello di pulizia del dispositivo non sia stato alterato.

Nel caso in cui sia necessario l'uso del dispositivo vicino o sovrapposto ad altri apparecchi verificare il corretto funzionamento.

Se l'involucro, il cavo o il connettore dell'alimentatore presentano segni di usura o danneggiamento provvedere alla sostituzione immediata dello stesso.

Assicurarsi che l'utilizzatore non presenti alcuna patologia indicata nella sezione "controindicazioni".

Prima di ogni utilizzo controllare sempre l'integrità dell'apparecchio e degli accessori (condizione indispensabile per l'effettuazione del trattamento).

Si declina ogni responsabilità in merito ad un uso difforme da quanto indicato e prescritto nel presente manuale.

5.3. Avvertenze durante l'uso

Durante l'utilizzo del dispositivo vanno seguite alcune avvertenze.

- I cavi e i connettori non devono essere avvolti attorno al collo di persone per evitare qualsiasi rischio di strangolamento o asfissia.
- Lasciare il dispositivo libero in aria.
- Mantenere i tubi di connessione in modo tale che non siano strozzati consentendo così il corretto afflusso di aria nelle camere.
- Il dispositivo ed i suoi componenti non sono protetti contro l'ingresso di liquidi: non versare alcun liquido sopra il dispositivo e i suoi componenti.
- Gli apparecchi di radiocomunicazioni mobili e fissi potrebbero influenzare il funzionamento del dispositivo.
- Il dispositivo non deve essere usato in presenza di liquidi infiammabili.
- Mantenere il dispositivo in un luogo asciutto.

5.4. Controindicazioni

Controindicazioni assolute

L'uso della pressoterapia è controindicato nei seguenti casi:

1. Trombosi venosa profonda (TVP)
2. Tromboflebite acuta
3. Embolia polmonare recente
4. Infezioni acute locali (cellulite infettiva, erisipela, infezioni cutanee batteriche)
5. Insufficienza cardiaca congestizia grave
6. Edema polmonare
7. Ischemia arteriosa severa (arteriopatia periferica avanzata, es. ABI < 0.5)
8. Neoplasia maligna attiva nell'area trattata (in particolare in ambito linfologico se non gestita da medico).

Controindicazioni relative

La pressoterapia può essere usata solo con cautela o supervisione medica nei seguenti casi:

1. Ipertensione arteriosa non controllata
2. Fragilità capillare marcata
3. Edema di origine cardiaca
4. Disturbi della sensibilità (neuropatia diabetica, ridotta percezione del dolore)
5. Gravidanza
6. Varici molto dolorose
7. Ferite aperte o dermatiti
8. Linfedema non diagnosticato.

5.5. Effetti indesiderati

Non sono stati registrati effetti indesiderati. In casi particolari, se non associata a delle terapie complementari, possono insorgere casi di indurimento dell'edema e di flogosi cronica.

6. Principi d'azione

La pressoterapia non è un semplice trattamento meccanico, ma una precisa metodica di **compressione pneumatica sequenziale** progettata per risvegliare la vitalità dei tessuti. Attraverso un'onda pressoria ritmica ed avvolgente, il dispositivo esegue un massaggio drenante dei liquidi degli arti, svolgendo effetti benefici sia sul circolo venoso, che su quello linfatico, restituendo immediata leggerezza a tutto il corpo.

La Pressoterapia per lo Sport

Nel contesto sportivo, la pressoterapia si rivela un alleato indispensabile per il **defaticamento**. Dopo un allenamento o una gara gli arti inferiori appaiono generalmente più gonfi e la sensazione di pesantezza è più marcata: una seduta dedicata, accelera i processi di **recupero muscolare**, restituendo elasticità e prontezza ai muscoli, in tempi ridotti.

Protocollo di utilizzo

Per garantire la massima efficacia e il rispetto della fisiologia del corpo, il ciclo di lavoro segue rigorosamente il movimento naturale dei fluidi in **senso distale-prossimale** (dalle estremità verso il cuore).

Sequenza operativa

Una volta indossati i **gambali**, la pressione inizierà ad agire partendo dalla pianta del piede, risalendo in modo fluido e costante verso la zona inguinale. Durante l'uso della **fascia addominale**: il gonfiaggio inizierà dalla camera superiore, per poi scendere progressivamente verso quelle più vicine all'inguine.

7. Dotazione e accessori

I prodotti della linea PressCare vengono forniti completi di gambali e connettori: pertanto, una volta aperto l'imballaggio, verificare che la dotazione standard sia completa. Qualora dovesse mancare qualche elemento, contattare il rivenditore autorizzato a cui ci si è rivolti per l'acquisto.

7.1. Dotazione standard

- 1 Dispositivo PressCare G280 con batteria inclusa
- 2 Gambali con connettori integrati (tg. S/M/L)
- 1 Alimentatore PressCare G250/G280
- 1 Manuale d'uso PressCare G280



7.2. Accessori

Gambale a 5 camere, compatibile con PressCare G250/G280, ambidestro, disponibile in tre taglie (S/M/L). Materiale: nylon con connettori in PVC.		
A - Lunghezza INGUINE-TALLONE B - Circonferenza COSCIA C - Circonferenza CAVIGLIA		
REF	Nome articolo	Descrizione articolo
G7962	Gambale G250/G280 - S	Lunghezza INGUINE-TALLONE: 75 cm Circonferenza COSCIA: 76 cm Circonferenza CAVIGLIA: 47 cm
G7963	Gambale G250/G280 - M	Lunghezza INGUINE-TALLONE: 86 cm Circonferenza COSCIA: 80 cm Circonferenza CAVIGLIA: 48 cm
G7964	Gambale G250/G280 - L	Lunghezza INGUINE-TALLONE: 97 cm Circonferenza COSCIA: 84 cm Circonferenza CAVIGLIA: 49 cm

REF	Nome articolo	Descrizione articolo
G7968	Estensione Gambale G250/G280 - S	Aumenta la vestibilità del gambale di circa 7 cm sulla caviglia e 9 cm sulla coscia.
G7969	Estensione Gambale G250/G280 - M	Aumenta la vestibilità del gambale di circa 7 cm sulla caviglia e 9 cm sulla coscia.
G7970	Estensione Gambale G250/G280 - L	Aumenta la vestibilità del gambale di circa 7 cm sulla caviglia e 9 cm sulla coscia.
G7971	Fascia addominale per G250/G280/G400	Accessorio a 5 camere per trattamenti su addome, fianchi e glutei. Compatibile con dispositivi PressCare G250/G280/G400. Taglia unica. Dimensioni: (125 x 35) cm Materiale: nylon con connettori in PVC.
G7972	Estensione fascia addominale	Grazie al velcro, può essere attaccata alla fascia addominale per aumentarne la vestibilità. Taglia unica. Dimensioni: (40 x 35) cm Materiale: nylon.

8. Preparazione e messa in servizio del dispositivo

Rimuovere il prodotto e le eventuali sue parti dagli imballaggi. Non lasciare alla portata dei bambini gli elementi dell'imballaggio e non disperderli nell'ambiente.

Prima di iniziare il trattamento, appoggiare il dispositivo su di una superficie piana. Collegare l'alimentatore al dispositivo e alla rete elettrica (se non si desidera utilizzare il dispositivo a batteria).

Per un corretto funzionamento del prodotto l'utilizzatore deve indossare i gambali in dotazione e collegare entrambi i tubi flessibili all'unità di controllo.

Per indossare i gambali: aprire la zip, indossare il gambale, richiudere la zip. Collegare il tubo flessibile del gambale all'unità di controllo, seguendo il verso della freccia del connettore.

Nel caso sia necessario aumentare la circonferenza dei gambali, collegare, tramite le due zip, le relative estensioni, acquistabili come accessorio opzionale.

Prima di avviare il trattamento, assumere una posizione comoda: seduta, reclinata o sdraiata.



9. Programmi preimpostati

Descrizione programma	Sequenza gonfiaggio camere
MODE A Attivazione leggera - Warm Up: Gonfiaggio progressivo di una camera alla volta per un massaggio leggero che favorisce il rilassamento delle gambe. <i>Ideale per: comfort quotidiano, ritrovare la sensazione di leggerezza tra sessioni ravvicinate di allenamento, massaggio riattivante prima di una gara.</i> Durata consigliata per seduta: 20-30 min	
MODE B Massaggio profondo: Gonfiaggio sequenziale di tutte le camere e successivo sgonfiaggio simultaneo. La compressione risulta più intensa ed avvolgente, pensato per un'azione più profonda ed un effetto rimodellante. <i>Ideale per: massaggio più intenso e profondo</i> Durata consigliata per seduta: 20-30 min	
MODE A-MODE B Il programma combina le sequenze di gonfiaggio MODE A e MODE B, per un'esperienza completa, che alterna attivazione leggera e compressione profonda. <i>Ideale per: benessere generale e momenti di relax.</i> Durata consigliata per seduta: 25-35 min	

9.1. Frequenza trattamenti

Frequenza settimanale consigliata

- Utilizzo leggero / mantenimento: 2-3 sedute a settimana.
- Utilizzo regolare / benessere quotidiano: 3-5 sedute a settimana.
- Utilizzo intensivo (cicli brevi): fino a 5-6 sedute a settimana, alternando i diversi programmi disponibili.

Suggerimenti per il trattamento

- Alternare programmi a compressione più dinamica (es. MODE B) con programmi più gradualmente e rilassanti (es. MODE A e combinato MODE A-B) per favorire comfort e varietà di stimolazione.
- Il livello di pressione deve risultare sempre gradevole e ben tollerato: la compressione deve essere percepita come efficace ma mai dolorosa o eccessivamente intensa.
- Al termine della seduta si consiglia di mantenere una posizione rilassata per alcuni minuti, favorendo una piacevole sensazione di benessere e leggerezza.

- Qualora il risultato percepito non fosse soddisfacente, è possibile ripetere il trattamento nei giorni successivi modificando progressivamente i parametri di utilizzo, aumentando gradualmente il tempo di applicazione e/o il livello di pressione fino a individuare l'impostazione più adatta alle proprie esigenze.
- In presenza di fastidio, dolore o eccessiva sensazione di compressione, ridurre il livello di pressione e valutare un incremento graduale della durata della seduta mantenendo sempre una condizione di comfort durante tutto il trattamento.

10. Modo d'uso

Si prega di leggere attentamente le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Per ottenere un massaggio più efficace, si prega di utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni.

Accensione e spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo.

Il dispositivo è dotato di funzione memoria: all'avvio vengono automaticamente richiamate le ultime impostazioni utilizzate (livello di pressione, modalità di gonfiaggio e durata del trattamento), che vengono proposte come configurazione predefinita per la sessione successiva e visualizzate sul display in attesa del comando successivo; durante questa fase la scritta "Program" lampeggerà fino all'avvio del nuovo programma selezionato.

Per spegnere il dispositivo, tenere nuovamente premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi.

ATTENZIONE: se non viene avviato alcun trattamento, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti di inattività.

Selezione programma: è possibile cambiare la modalità di gonfiaggio (MODE A, MODE B, oppure MODE A-B) premendo il tasto "Program".

Selezione camera: premendo il tasto "Area", è possibile selezionare la parte del corpo da trattare, quindi gonfiare una o più camere per una totale personalizzazione del trattamento. Sono possibili 14 combinazioni diverse di selezione delle camere.

Regolazione della pressione: sono previsti 15 livelli di pressione, da 40 a 180 mmHg (step da 10 mmHg). Per modificare l'intensità del massaggio, usare i tasti incremento (+) e decremento (-) della pressione. Sugeriamo di impostare alla prima applicazione una pressione di circa 40 mmHg per poi, eventualmente incrementare progressivamente.

Durata del trattamento: Premendo il tasto "Tempo" è possibile incrementare la durata del trattamento di 5 minuti, da un tempo minimo previsto di 10 minuti, ad un tempo massimo di 30 minuti. Consigliamo di iniziare con trattamenti brevi di 10 minuti, per poi eventualmente incrementare la durata nelle sedute successive.

Avvio e pausa del programma: Per avviare il gonfiaggio dei gambi, dopo aver selezionato il programma desiderato o le camere da gonfiare, premere il tasto "Start/Pausa". Per interrompere il gonfiaggio e mantenere la pressione raggiunta, ripremere lo stesso tasto. Quando il programma è in pausa, lampeggerà sullo schermo la parola "Program". Se il dispositivo non riceverà un nuovo comando entro 3 minuti, si spegnerà.

Termine del trattamento: Dopo l'uso, spegnere il dispositivo e scollegare entrambi i gambi dal dispositivo per permettere la fuoriuscita dell'aria dalle camere.

11. Pulizia e manutenzione

11.1. Pulizia

1. Prima di pulire il dispositivo o i suoi accessori: spegnere il dispositivo ed assicurarsi che non sia allacciato alla rete elettrica.
2. Se sporchi, pulire l'unità di controllo, i manicotti e i tubi flessibili con un panno umido e pulito.
3. Asciugare accuratamente con un panno pulito.
4. Non consentire l'ingresso di corpi estranei nei tubi flessibili.
5. Non immergere le camere e i tubi di raccordo in acqua. Non lavare a secco.
6. Non utilizzare benzina, alcool, diluenti o altri liquidi irritanti per pulire la macchina, poiché potrebbero causare malfunzionamenti o danneggiare o scolorire i componenti.
7. Non lasciare che lanugine o polvere si accumulino sull'unità di controllo o sui collegamenti dei tubi flessibili. Se si accumula lanugine o polvere, pulire tutto il sistema con un panno asciutto prima dell'uso.

Consultare sempre i simboli di lavaggio che compaiono sull'etichetta dell'accessorio.

11.2. Modalità di conservazione

Nel caso di inutilizzo prolungato, conservare il prodotto in un ambiente asciutto e riparato dalla luce. Proteggere i dispositivi dalla polvere conservandoli, ad esempio, nella confezione originale o in una confezione simile. Non posizionare i dispositivi vicino a fonti di innesco o a fonti di calore intense. Fare riferimento anche alle informazioni contenute al paragrafo "5.1. Comportamento obbligatorio" e al paragrafo "1.4. Condizioni di immagazzinamento, stoccaggio e trasporto".

11.3. Smaltimento

Il prodotto va smaltito nel rispetto delle normative e dei Regolamenti in vigore nel proprio Paese.

12. Etichettatura e simboli

12.1. Descrizione dei simboli

	Il simbolo CE indica che il prodotto soddisfa i requisiti del Regolamento (UE) 2023/988.	MADE IN PRC	Indica che il prodotto è realizzato in Repubblica Popolare Cinese.
---	--	--------------------	--

	Indica l'obbligo di lettura del manuale prima dell'utilizzo del dispositivo.		Informa di un comportamento obbligatorio.
	Simbolo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Indica che il prodotto non va smaltito come rifiuto indifferenziato, ma deve essere inviato ad apposite strutture di raccolta per il recupero e il riciclaggio. Il marchio RAEE (in inglese WEEE) deve figurare su tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dell'UE.		Indica quali materiali vanno smaltiti come rifiuto riciclabile.
			Indica che il prodotto è realizzato nel rispetto della Direttiva 2011/65/CE
			Indica che la classe elettrica del dispositivo è "classe II"
	Identifica il Fabbricante		Identifica la data di produzione.
	Identifica l'Importatore.	Product name	Identifica la tecnologia del dispositivo
REF	Indica il codice di articolo del prodotto.	SN	Indica il numero di serie del prodotto.
	Presente sul confezionamento esterno, indica il range di temperatura per il trasporto, lo stoccaggio e la conservazione del prodotto.	DC Input	Specifica i valori di alimentazione del dispositivo.
	Presente sul confezionamento esterno, indica il range di umidità relativa per il trasporto, lo stoccaggio e la conservazione del prodotto.	Output	Specifica le prestazioni del dispositivo.
	Presente sul confezionamento esterno, indica il range di pressione per il trasporto, lo stoccaggio e la conservazione del prodotto.	DC Power Supply	Indica le caratteristiche dell'alimentatore del dispositivo, il suo Fabbricante e il modello

12.2. Etichettatura del dispositivo



12.3. Etichettatura accessori

	Questo simbolo sul vostro apparecchio serve ad indicare che è in conformità con i requisiti delle direttive vigenti.		Non lavare
MADE IN PRC	Indica che il prodotto è realizzato in Repubblica Popolare Cinese.		Non stirare
REF	Indica il codice di articolo del prodotto.		Non strizzare

13. Risoluzione problemi

Fenomeno	Possibile causa	Soluzione
Il dispositivo non funziona e lo schermo è spento.	1. Il dispositivo non è collegato all'alimentatore. 2. L'alimentatore non è collegato alla rete elettrica. 3. L'alimentazione di rete non è presente.	1. Premere il pulsante di accensione per accendere l'unità di controllo. 2. Assicurarsi che l'alimentatore sia collegato correttamente all'unità di controllo e alla presa a muro. 3. Controllare se la presa a muro funziona.

Lo schermo del dispositivo è acceso, ma le camere non si gonfiano.	1. Solo uno dei manicotti è attaccato al tubo dell'aria. 2. I tubi dell'aria non sono collegati saldamente. 3. I manicotti sono stati danneggiati.	1. Collegare entrambi i manicotti. 2. Controllare che i tubi dell'aria siano inseriti correttamente. 3. Controllare se i manicotti presentano perdite d'aria e che siano integri.
Il gonfiaggio si interrompe durante il funzionamento.	1. I tubi dell'aria non sono più collegati saldamente. 2. Ci sono delle perdite dai tubi o dai gambali. 3. Il tempo del programma preimpostato è terminato. 4. Il dispositivo è scarico.	1. Controllare che i tubi dell'aria siano collegati correttamente. 2. Verificare se c'è fuoriuscita d'aria dai tubi o dalle camere dei gambali. 3. Il dispositivo si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo preimpostato; premere il pulsante di accensione per avviare una nuova sessione, se necessario. 4. Ricaricare il dispositivo usando il carica batterie in dotazione col prodotto. <u>Se il problema è la batteria:</u> La sostituzione della batteria deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato e autorizzato da Domino Srl. Per richiedere il servizio, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

DOMINO S.R.L.



Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALIA



(+39) 0438 7933

globuscorporation.com